

Westerstrand Urfabrik AB

Timstock

Manual



Fjärde generationen




Vi har all tid för dig

Beskrivning

Westerstrands Timstock visualiserar och gör det lättare att förstå det abstrakta begreppet tid. När tiden passerar släcks dioderna i tidslinjen en efter en till dess att tiden är slut och Timstocken larmar.

Regelbunden användning av timstocken kan hjälpa dig att utveckla tidsuppfattningen och minska stress och frustration i vardagen.

Timstocken är damm- och vattentät och kan användas inomhus, utomhus samt i duschen. Om timstocken används vid bad finns även, som option, vår skyddsväska som innehåller en flytkudde. Användning av skyddsväskan gör att timstocken kan flyta.

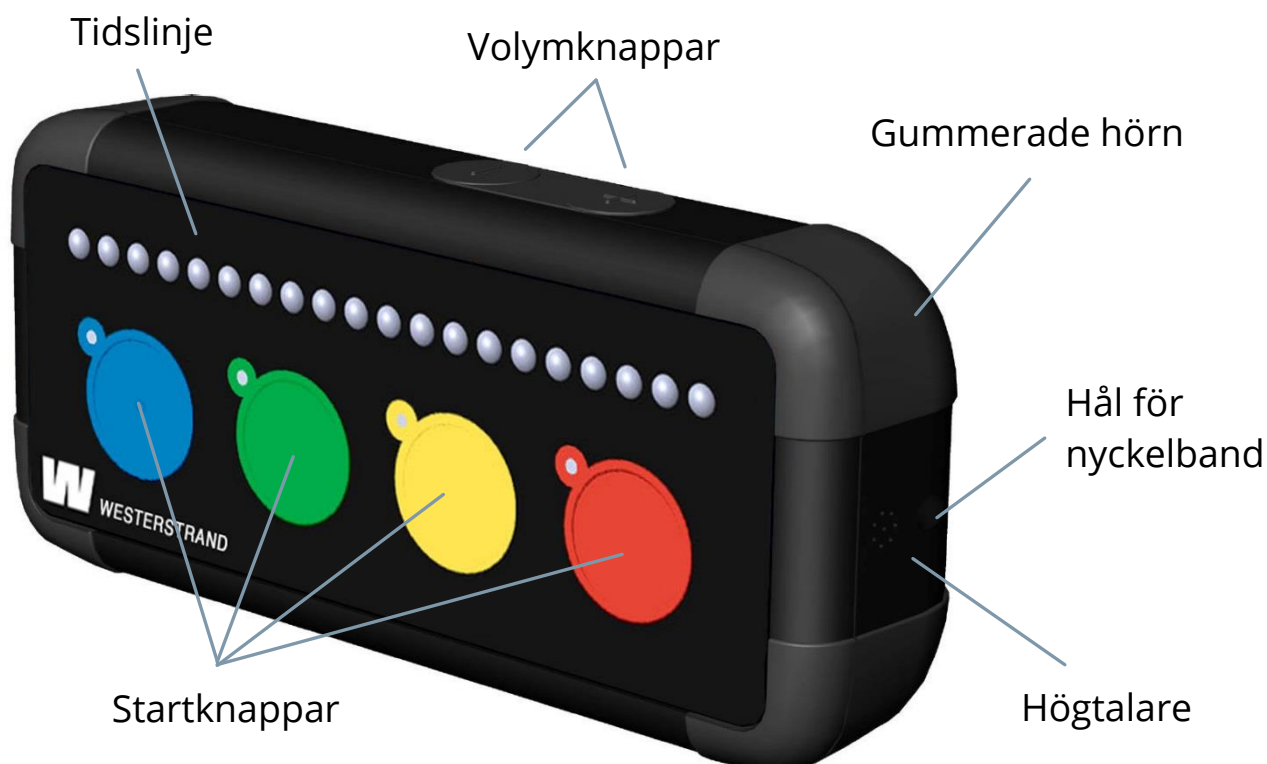

Kom igång

Ställ tiden

Tryck på en av startknapparna (röd, gul, grön eller blå) som motsvarar den önskade tiden. Dioderna tänds och nedräkningen startar. Bredvid varje startknapp tänds även en liten diod för att visa vald tid.

Volym

Tryck på knapparna på ovansidan för att höja eller sänka volymen på larmsignalen. Volymen har 8 olika lägen. När högsta resp. lägsta volym är uppnådd vibrerar timstocken under 1 sekund.

Tryck **+** för att höja volymen

Tryck **-** för att sänka volymen

För ljudlöst läge håll **-** intryckt under 1,5 sek.

För högsta volym håll **+** intryckt under 1,5 sek.

Funktion

Nedräkningen visualiseras av de röda lysdioderna som slocknar, en efter en, allteftersom tiden går. För att indikera att den valda tiden har gått ut larmar timstocken med blinkande dioder, ljudsignal och vibration i några sekunder. Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå startknapp samtidigt trycks in under 2 sekunder och sedan släpps. Därefter kan ny tid startas.

Dolda funktioner


Justera ljusstyrka och Aktivera/avaktivera vibration


1. Tryck på en av startknapparna (röd, gul, grön eller blå) för att aktivera timstocken.
2. Tryck in grön och gul knapp samtidigt i ca 2 sekunder tills att det hörs ett "uppljud".
3. De 20st röda lysdioderna tänds upp i aktuell ljusstyrka. Även grön och gul lysdiod tänds.

Tryck  för att höja ljusstyrkan

Tryck  för att sänka ljusstyrkan

4. Gå vidare genom att trycka in grön eller gul knapp.
5. Ett pip hörs och de röda lysdioderna börjar "vandra".

Tryck  för att aktivera vibration - ett pip hörs och timstocken vibrerar.

Tryck  för att avaktivera vibration - ett pip hörs och efter några sekunder hörs ytterligare ett pip.

6. Gå vidare genom att trycka in grön eller gul knapp. Ett "nedljud" hörs och lysdioderna slocknar. Inställningarna är nu sparade.

(Om inga knapptryck/val sker inom cirka 1 min så återställs de gamla inställningarna och timstocken hamnar i viloläge)

Dolda funktioner

Låsa/låsa upp knappar

1. Tryck på en av startknapparna (röd, gul, grön eller blå) för att aktivera timstocken.
2. Tryck in alla startknapparna (röd, gul, grön och blå) samtidigt i ca 2 sekunder tills att ett "nedljud" hörs.
3. Släpp knapparna för att aktivera eller avaktivera låsfunktionen. (Låsfunktionen avaktiveras automatiskt efter att tiden gått ut)

Återställ fabriksinställningar

1. Tryck på en av startknapparna (röd, gul, grön eller blå) för att aktivera timstocken.
2. Tryck in alla startknapparna (röd, gul, grön och blå) samtidigt i ca 3 sekunder tills att **två** "nedljud" hörs.
3. Släpp sedan knapparna. Timstocken kommer spela några "uppljud" och "nedljud".
4. När lysdioderna slocknat så har en fabriksåterställning gjorts. (Ljusstyrka ca 70% av max samt vibration är aktiverad)

Batteridrift

Timstocken drivs av två AA-batterier. Batterier medföljer vid leverans. Dessa räcker för ca 60 timmars användning innan de behöver bytas. När lysdiodernas sken börjar avta ska båda batterierna bytas ut mot nya. Ta ur batterierna om du inte ska använda timstocken under en längre period.



Låsskruv till batterilucka

Låsskruv till batterilucka

Byt batterier så här:

1. Skruva upp batteriluckans låsskruvar med en liten stjärnskruvmejsel.
2. Byt batterierna till nya AA-batterier. Titta så du sätter dem åt rätt håll, + och -
3. Skruva på batteriluckan igen. Observera att batteriluckan endast passar åt ett håll.

Teknisk specifikation





Kartongen innehåller

1 x Timstock (Inkl. 2 x AA batterier)

1 x Nyckelband

1 x Manual

Storlek	105x47x28 mm
Vikt	75,2 g (exkl. batterier)
	121 g (inkl. batterier)
Strömkälla	2 st. 1,5V R6 / AA-batterier
Omgivningstemperatur	-10°C till +40°C
Skyddsklass	IP67 (damm- och vattentät)

Startknapp-färger	Timstocksmodeller				
	8	20	60	80	8
	2 min	5 min	15 min	20 min	2 tim
	4 min	10 min	30 min	40 min	4 tim
	6 min	15 min	45 min	60 min	6 tim
	8 min	20 min	60 min	80 min	8 tim

Underhåll


Rengöring

Vid rengöring, torka av timstocken med en fuktig och luddfri trasa med vanligt rengöringsmedel, alternativt med rengöringsduk avsedd för elektronik.

Miljö & Garanti

Vi lämnar 1 års garanti för fabriktionsfel. Garantin täcker inte handhavandefel.



Timstock innehåller elektronik och ska därför återvinnas som elavfall. Detta lämnas normalt till din återvinningscentral,  kontakta kommunen om du är osäker.



"För Sverige uppfyller vi våra plikter enligt lagen om producentansvar för el-avfall genom att vara anslutna till *elretur*"

Hål för nyckelband



På ena sidan av timstocken finns ett hål där du fäster tillbehöret Nyckelband för att bära timstocken runt halsen. Använd endast medföljande originaltillbehör till din timstock för att undvika risk för kvävning och andra skador.


Produkten får inte användas i någon annan miljö eller på annat sätt än vad som föreskrivits.

Batterier innehåller farliga ämnen. Förvara batterier utom räckhåll för obehöriga.

Kontakta Westerstrand omedelbart vid skada eller om risk för skada uppstått.

Senaste versionen av manualen finns att ladda ned på westerstrand.se

Tillverkare av svenska kvalitetsprodukter sedan 1906

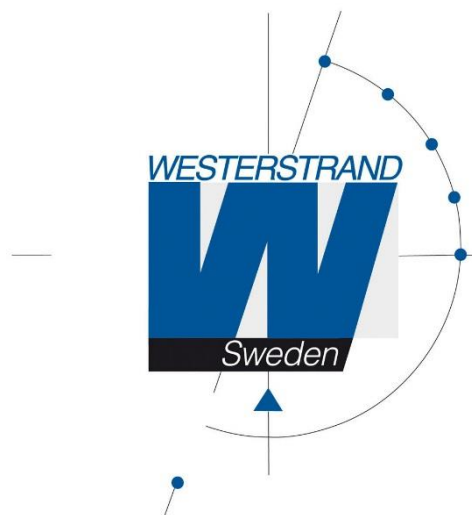

Westerstrand Urfabrik AB
Verkstadsgatan 1, 545 31 Töreboda



info@westerstrand.se



0506-480 00



westerstrand.se



Westerstrand Urfabrik AB
Tid- & Resultatanläggningar



Westerstrand Urfabrik AB

DOK11084sv02