

# Timstock

## Visuellt tidshjälpmedel



*Ny version* av vår välkända Timstock. Vårt visuella tidshjälpmedel har genomgått en rad med förbättringar och uppdateringar.

*Fjärde generationen* av Timstocken är nu redo att inta marknaden.




Westerstrands Timstock visualiserar och gör det lättare att förstå det abstrakta begreppet tid. När tiden passerar släcks dioderna i tidslinjen en efter en till dess att tiden är slut och timstocken larmar. Timstocken åskådliggör tidsbegreppen som NÄR eller HUR LÅNGE dagliga rutiner och förehavanden ska äga rum. Regelbunden användning av timstocken kan hjälpa dig att utveckla tidsuppfattningen och minska stress och frustration i vardagen.

## Beskrivning

Produkten är utvecklad i samarbete med forskare specialiserade på tekniska hjälpmedel. Det finns nu nio olika versioner som täcker tidsperioder från 2 min upp till 8 timmar. Varje timstocksversion har 4 förprogrammerade tidsperioder att välja mellan. Se alla varianter på sista sidan. Alla varianter har gummerade hörn för extra stötdämpning och skydd mot glid.

I leveransen ingår ett nyckelband samt bruksanvisning. Timstocken drivs av två AA-batterier. Batterier medföljer vid leverans. Dessa räcker för ca 60 timmars användning innan de behöver bytas. Timstocken är damm- och vattentät och kan användas inomhus, utomhus samt i duschen. Om timstocken används vid bad finns även, som option, vår skyddsväska som innehåller en flytkudde. Användning av skyddsväskan gör att timstocken kan flyta.

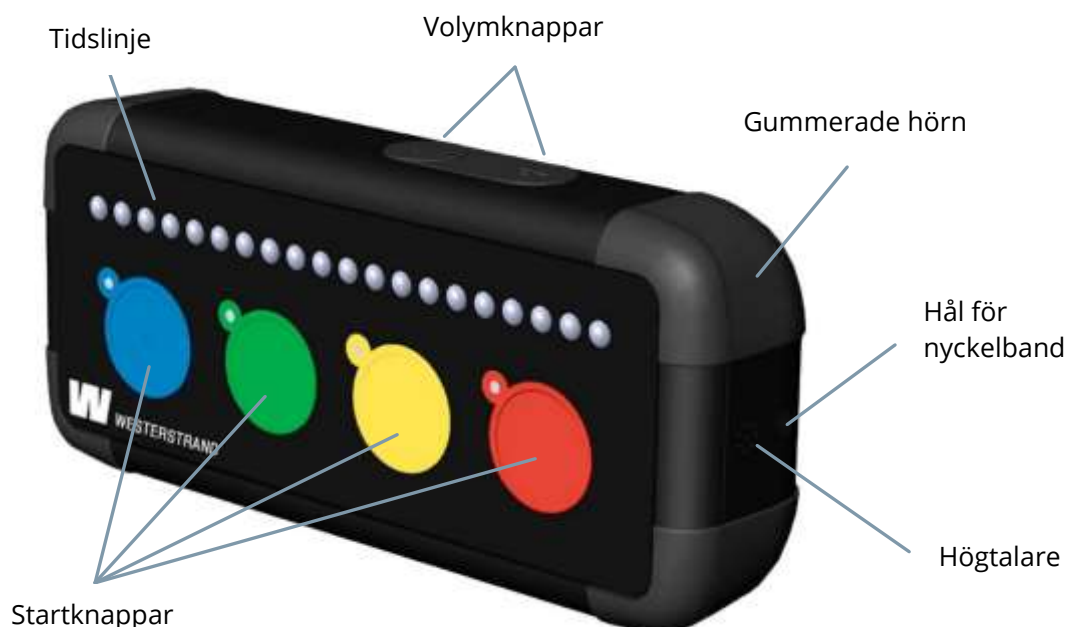



## Teknisk specifikation

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Storlek              | 105x47x28 mm                 |
| Vikt                 | 75,2 g (exkl. batterier)     |
|                      | 121 g (inkl. batterier)      |
| Strömkälla           | 2 st. 1,5V R6 / AA-batterier |
| Omgivningstemperatur | -10°C till +40°C             |
| Skyddsklass          | IP67 (damm- och vattentät)   |

## Funktion

Genom att trycka på en av startknappar (röd, gul, grön eller blå) med markering av gällande tidsperiodsiffra som motsvarar den önskade tiden tänds det antal lysdioder som startknappen representerar och nedräkningen startar. Bredvid varje startknapp finns en liten diod som tänds för att visa vald tid. Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå startknapp trycks in och hålls intryckta samtidigt under två sekunder och sedan släpps. Därefter kan ny tid startas.

Nedräkningen visualiseras av en rad röda lysdioder som slocknar, en efter en, allteftersom tiden går. För att indikera att den valda tiden har gått ut larmar timstocken med blinkande dioder, ljudsignal och vibration. Indikeringen varar i några sekunder men kan stängas av genom tryck på en av startknapparna. Ljudnivån regleras enkelt via knapparna + och - på timstockens övre långsida.





## Artikeltabell

| Artikelnummer | Version             |  |
|---------------|---------------------|--|
| 119628-02     | 8 min               |  |
| 119622-02     | 20 min              |  |
| 119622-12     | 20 min utan siffror |  |
| 119622-22     | 20 min stående      |  |
| 119620-02     | 60 min              |  |
| 119620-12     | 60 min utan siffror |  |
| 119623-02     | 80 min              |  |
| 119623-12     | 80 min utan siffror |  |
| 119630-02     | 8 tim               |  |

